

Gebruiksaanwijzing Navelstreng ring

NL




Schuif de navelstreng ring over de klem. Knijp met een andere klem de navelstreng bij de moeder dicht.



Knijp met de klem, waar de navelstreng ring omheen zit, de navelstreng bij de baby dicht. Zorg dat de tip van de klem op gelijke hoogte zit met de navelstreng (zie afbeelding).




Knip de navelstreng door aan de kant van de moeder, dichtbij de klem met de navelstreng ring.

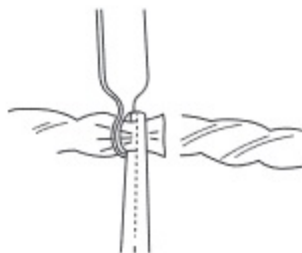







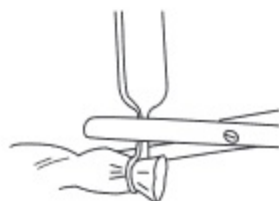


Pak de navelstreng ring stevig vast bij het lange gedeelte en trek hem van de klem over de navelstreng heen.



Gebruik de navelstreng ring niet zoals op de afbeelding. Dit kan het scheuren van de navelstreng ring tot gevolg hebben.



Knip het lange gedeelte van de navelstreng ring af, dichtbij de ring welke nu om de navelstreng zit.

 Read the user manual	 Manufacturer	 Do not reuse. Disposable Product.
 Article number	 Use before	 Medical Device Directive 93/42/EEC
 Lot number	 Do not use broken packaging.	 Sterilized with ethylene oxide.